

Filtros de aspiración médica

Para mantener la conformidad con las normas de seguridad

Gama completa

- | Filtros para virus, filtros bacterianos, filtros de olores
- | Conexiones de Medela y cónicas
- | Desechables

Alto rendimiento

- | Membranas médicas exclusivas y de alto rendimiento
- | Altos niveles de retención de bacterias, comprobados en laboratorio
- | Baja resistencia al aire gracias a su gran superficie



Medela ofrece una enorme gama de filtros desechables que son perfectamente compatibles con todos los dispositivos de asistencia sanitaria de Medela. Esto le permite configurar su sistema de aspiración a medida para adaptarse a diferentes requisitos higiénicos.

- Los filtros bacterianos proporcionan el primer nivel básico de protección higiénica. Un requisito básico si su sistema no incluye un filtro bacteriano integrado.
- Los filtros de desbordamiento ofrecen un mecanismo de seguridad esencial para evitar que los fluidos entren en el aspirador o en el sistema de vacío central. Debe haber dos mecanismos antidesbordamiento redundantes en cualquier sistema de aspiración.
- Las membranas para olores atrapan de forma eficaz los gases y olores, siendo especialmente útiles en contenedores utilizados durante varias horas.
- Además, Medela ofrece filtros bacterianos reutilizables para aplicaciones en las que las membranas se deben sustituir con una frecuencia superior.
- Para garantizar la seguridad de los pacientes y el personal del hospital, la frecuencia de sustitución de los filtros de los aspiradores se basará en las instrucciones de uso y estarán conformes con la política local aplicable sobre control de infecciones.
- Capacidad del filtro (filtro de bacterias): 99,985% para partículas mayores de 0,3 µm.
- Capacidad de filtrado (filtro para virus) del 99,99984% para partículas de un tamaño superior a 0,03 µm.



Conexión de Medela

Conexión cónica

Gama de filtros

Tipo de filtro	Conexiones Medela/Medela	Conexiones cónicas/cónicas	Aplicación recomendada	Para los siguientes sistemas de recogida
Antibacteriano	Ref. 077.0573		Protección higiénica básica	Recipientes reutilizables
Antivirus	Ref. 101035265		Protección higiénica básica	Recipientes reutilizables
Antibacteriano/ antidesbordamiento	Ref. 077.0571	Ref. 077.0572	Protección contra desbordamientos de segunda fase	Bolsas desechables Recipientes reutilizables
Antivirus/antidesbordamiento	Ref. 101035263	Ref. 101035264	Protección contra desbordamientos de segunda fase	Bolsas desechables Recipientes reutilizables
Antiolores/ Antibacteriano	Ref. 077.0575		Reducción del olor	Bolsas desechables Recipientes reutilizables

Sustitución de filtros

- En caso de desbordamiento o acumulación, o
- Semanalmente en caso de uso en un único paciente, o
- Diariamente, en caso de uso en varios pacientes.

Para detectar un filtro obstruido, comprobar el filtro antes de su uso en cada paciente. Cumplir con las directivas internas respecto a la higiene.

Tecnología de aspiración médica para profesionales sanitarios

Póngase en contacto con nosotros o con el representante local de Medela para obtener más información.

 Medela AG
Lättichstrasse 4b
6340 Baar
Switzerland
www.medela.com

Spain & Portugal
Productos Medicinales Medela, S.L.
c/ Manuel Fernández Márquez, 49
08918 Badalona (Barcelona)
Spain
Phone +34 93 320 59 69
Fax +34 93 320 55 31
info@medela.es
info@medela.pt

Contacto local

